


Verwendung von Abdeckplatten

Individuell einsetzbare Abdeckplatten zum temporären Freistellen von Sitzbereichen nach Operationen oder bei offenen Wunden.

Empfohlene Kissenhöhe - 10 cm.

Die Abdeckplatten werden für 1, 2, 4 sowie 6 Dome/Zellen angeboten.

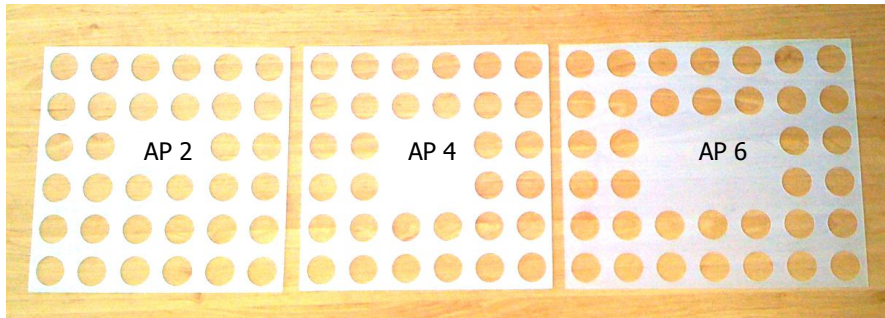

(i.d. Ansicht fehlt AP 1)

Anwendung:

Die Abdeckplatte wird auf das luftleere Kissen gelegt und die Zellen werden durch die Löcher gezogen – die Platte wird bis auf den Kissenboden gedrückt. Durch die Verengung der Zelle am Boden ist die Abdeckplatte nach Luftbefüllung ohne zusätzliche Hilfsmittel fixiert. **Die druckentlastende Wirkung des Kissens wird dadurch nicht beeinträchtigt.** Zur Reinigung des Kissens kann die Deckplatte, nachdem die Luft aus dem Kissen gelassen wurde, abgezogen werden.

Es sollte darauf geachtet werden, dass die freigestellte Hautfläche nicht „durchhängt“ – dadurch können Wasseransammlungen entstehen (Loch-Ödeme).

Beispiel AP4 :

